



## INSTRUÇÕES DE USO

### DIACLENZ CONCENTRADO

#### **Finalidade de uso**

O DIACLENZ CONCENTRADO é uma solução de lavagem enzimática especialmente desenvolvida para a limpeza dos instrumentos e partes dos equipamentos hematológicos que entram em contato com as amostras de sangue. Possui intensa atividade proteolítica que dissolve efetivamente coágulos e sedimentos protéicos.

**Produto destinado à uso em Diagnóstico *in vitro*.**

#### **Descrição do Produto**

- O DIACLENZ CONCENTRADO contém:

Matérias Primas	Concentração (em g/L)
Enzima Proteolítica	< 55,00%
Tampão	< 0,29 %

- Apresentações previstas: 50mL, 100mL e 1L.
- O produto é fornecido pronto para uso.
- Registro na Anvisa: 80019640030.

#### **Condições de Transporte e Armazenamento**

O DIACLENZ CONCENTRADO deve ser transportado e armazenado em temperatura entre 2°C - 8°C.

#### **Estabilidade**

O produto é estável até a data de vencimento indicada na etiqueta, quando mantido em sua embalagem original fechada e armazenado em temperatura ambiente (2°C - 8°C). Evitar o congelamento ou calor excessivo. Validade:

- Produto Fechado: 18 meses
- Produto Aberto: 60 dias

#### **Modo de Usar**



- O DIACLENZ CONCENTRADO deve ser mantido fechado quando não estiver em uso. Para equipamentos em que seu uso é externo, deve-se retirar a tampa do frasco do DIACLENZ CONCENTRADO, inserir o produto na agulha de aspiração e fechar novamente o frasco após a aspiração.
- Em equipamentos em que o DIACLENZ CONCENTRADO fica acoplado, deve-se retirar a tampa e encaixar o produto no local apropriado do analisador. Em seguida, deve-se programar o mesmo seguindo orientações do Manual do Usuário do equipamento.
- Antes da utilização do equipamento para análise das amostras, deve-se obter um background válido.
- O próprio equipamento se encarrega de descartar a solução utilizada no recipiente para descarte (esgoto).
- Todos as unidades de DIACLENZ CONCENTRADO, após abertos pela primeira vez, devem ser utilizados por até 60 dias. Após esse período, é necessário descartar o produto de acordo com as normas vigentes no laboratório.

### **Precauções**

- O produto deve ser manuseado com os cuidados habituais do exercício laboratorial, com uso de EPI e por profissional qualificado.
- O DIACLENZ CONCENTRADO é irritante para os olhos e pele. Em caso de contato, lavar imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, consultar um médico.
- Não ingerir.

### **Calibração**

É aconselhável calibrar o analisador hematológico sempre que as condições de trabalho do mesmo forem alteradas. Por exemplo, após troca de lotes de reagentes, manutenção (com ou sem troca de peças), após longos períodos sem uso do equipamento, e sempre que houver alterações recorrentes no controle de qualidade. Devem ser seguidos os procedimentos de calibração indicados pelo fabricante do analisador hematológico.

### **Controle de Qualidade**

A DIAGNO sugere o uso de controles comerciais aprovados pela Anvisa. Os controles devem ser analisados antes de cada rotina, sempre que for utilizado um novo lote de reagente ou outro acessório e após a execução de manutenção preventiva e corretiva do equipamento.

### **Descarte**

Elimine produtos não utilizados, embalagens contaminadas e resíduos do produto conforme regulamentos locais, estaduais e federais.

### **Termos e Condições de Garantia**

A DIAGNO garante a qualidade do produto e se compromete a prestar assistência técnica e substituir o produto caso ocorram problemas decorrentes da fabricação, desde que as instruções de uso sejam seguidas corretamente.



### **Referências Bibliográficas**

1. Bernard, D.F.; Carter, A.B.; Crosland-Taylor, P.J.; Stewart, J.W. - An evaluation of the Coulter Model S. J. Clin. Pathol., 22: Supplement (Coll Path), 3: 26-33, 1969.
2. Guathier, J.; Harel, P. - Human leukocytes: Their Size Distribution and Mean Corpuscular volume. Canad. Med. Ass. J., 97: 793-796, 1967.
3. Lewis, S.M. and Burgess, B.J. Lab. Pract., 15: 305, 1966.
4. Pinkerton, P.H.; Spence, I.; Ray, P.K. - An assessment of the Coulter Model S. J. - Clin. Path., 23: 68-76, 1970.
5. Sharp, A.A.; Ballard, B.C.D. - An evaluation of the Coulter S. - Clin. Path., 23: 237-335, 1970.
6. Van Dilla, M.A.; Fulwyeler, M.J.; Boone, I.U. - Volume Distribution and separation of normal human leukocytes. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 125: 367-370, 1967.

**Fabricado por:** Diagno Soluções em Diagnóstico Ltda.  
Av. Joaquim José Diniz, n° 787 - Fernão Dias  
CEP: 31910 - 520, Belo Horizonte - Minas Gerais  
CNPJ: 01.866.908/0001-45  
Telefone: 31 3489-5100  
Email: atendimento@diagno.ind.br

**Responsável Técnico:** Giselle da Silva Amaral  
CRBM: 16380

**Última Revisão: 10/2021**

Giselle da Silva Amaral  
Responsável Técnico

Geza Kertesz  
Responsável Legal